

\*\*2017 年 11 月 (第 4 版) (新記載要領に基づく改訂)

\*2013 年 10 月 (第 3 版)

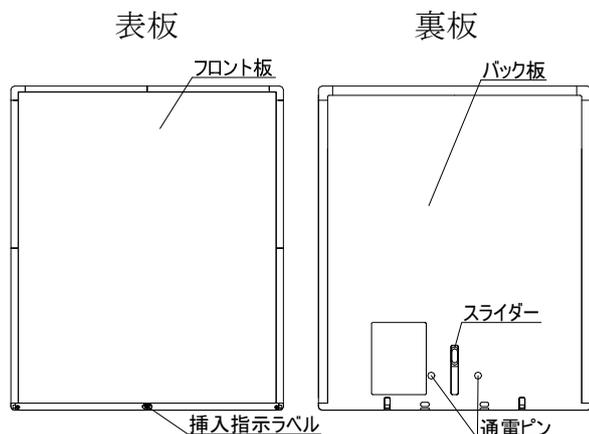
届出番号:13B2X10060110000

器 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管  
一般医療機器 光輝尽性蛍光板用カセット JMDN 70039000**光輝尽性蛍光板用カセット**

(Point-of-Care CR カセット/ GP)

**【形状、構造及び原理等】**

表板、裏板により構成されています。

**【保守点検に係る事項】**

1. カセットの使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
2. 使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。
3. 機器の廃棄  
カセットを廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。  
保守点検の内容は取扱説明書を参照してください。

**【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】**製造販売業者名:ケアストリームヘルス株式会社  
電 話:03-5646-2500(代)\*\* 製造業者名:ケアストリームヘルス  
Carestream Health, Inc.  
アメリカ**【使用目的又は効果】**

X線撮影などに用いる光輝尽性蛍光板用のカセットをいう。通常コンピュータドラジオグラフ、光輝尽性蛍光板と併用する。

**【使用方法等】**

光輝尽性蛍光板が装填された光輝尽性蛍光板用カセットを、X線撮影を行った後、専用のコンピュータドラジオグラフ装置でX線画像データを読み取る。

詳細な使用方法は、取扱説明書を参照してください。

**【使用上の注意】**

1. 光輝尽性蛍光板及びコンピュータドラジオグラフ装置は光輝尽性蛍光板用カセット (以下カセットという) に適合した製品を使用すること。
  2. カセットは水等がかからない場所で使用すること。
  3. 光輝尽性蛍光板をカセットから装填/取り出しする場合、取扱説明書に従って行うこと。またカセット内部の部品を損傷したり、汚したり、異物が混入しないように注意すること。
  4. カセットは落下させたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えると変形・破損することがありますので丁寧に取扱うこと。
  5. カセットをクリーニングする場合は、次の方法で行うこと。
    - ① 取扱説明書に従って、光輝尽性蛍光板をカセットから取り出します。
    - ② カセット内には水やクリーニング剤が浸入しないようにしてください。
- \*③ ケアストリーム MIN-R スクリーンクリーナー、ケアストリーム MIN-R スクリーンクリーナーワイブ、または低刺激石鹼と水を混合したもの (漂白剤の入った石鹼や洗剤は使用しないでください) を使用して、カセットの表面をクリーニングします。

詳細な使用上の注意は、取扱説明書を参照してください。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管条件  
水等のかかる場所、直射日光や強い紫外線が当たる場所、各種放射線があたる場所、高温高湿やほこりの多い場所は避けて保管してください。
2. 有効期間  
有効期間 (使用期限) は、使用上の注意を守り、正規の保守・点検を行った場合に限り5年間です。〔自己認証 (当社データ) による〕

取扱説明書を必ずご参照ください。