

2007年 5月 1日(新様式第2版:販売業者名変更)

2006年 3月 31日(新様式第1版:新法対応)

機械器具84 X線装置用蛍光板(37684000)  
一般医療機器

## コダック蛍光板 インサイト GF

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

支持体に蛍光体を塗布したシート状蛍光板です。

#### 【動作原理】

蛍光板中の蛍光体にX線が照射されると、蛍光体はX線のエネルギーを吸収し光に変換します。この光により間接用フィルムを感光させ、少ないX線照射で画像を形成させることができます。

### 【使用目的、効能又は効果】

X線像を間接用フィルムに露光させるための蛍光物質を塗布したシートをいいます。

### 【品目仕様等】

項目	仕様
寸法	JIS Z4905:2005 7.1項による。
コーナー	JIS Z4905:2005 7.2項による。
直角度	JIS Z4905:2005 付属書Bによる。

### 【操作方法又は使用方法等】

#### 【操作方法又は使用方法に関連する使用上の注意】

X線透視装置もしくは間接撮影装置に貼り付けて使用します。  
詳細な貼り付け方法は、取扱説明書を参照してください。

### 【使用上の注意】

- 蛍光板は水等がかからない場所で使用してください。
- 蛍光板に湿気、水分を付着させないよう、又異物などが撮影装置内に入らないように注意してください。
- 蛍光板の蛍光面を損傷しないように注意してください。
- 鉛ガラスは透明で限りなく着色していないものを使用してください。画像がボケたり歪んだり、また蛍光板の輝度を十分利用できないことになるので注意してください。
- 蛍光板を廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例、規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼してください。

### 【貯蔵、保管方法及び使用期間等】

#### 1. 保管方法

直射日光や紫外線があたる場所、各種放射線があたる場所や、高温高湿の場所を避けて保管してください。

#### 2. 有効使用期間

有効使用期間(使用期限)は、変色や感度低下等により、診断画像に劣化をきたすまでとし、このような場合には新品の蛍光板に交換してください。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 蛍光板の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。

#### 2. 使用者による日常及び定期点検(少なくとも6ヵ月ごと)を必ず行ってください。

点検を実施しない場合には、診断画像に悪影響を与える懸念がでできます。

#### 【点検項目】

- 変色(シミ)

### 【包装】

品目・サイズはそれぞれの商品の個包装上に明記してあります。

### 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者名: 東芝マテリアル株式会社

住 所: 〒235-8522

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地

電話番号: 045-770-3100

製造業者名: 東芝マテリアル株式会社

住 所: 〒235-8522

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地

電話番号: 045-770-3100

販売業者名: ケアストリームヘルス株式会社

住 所: 〒104-0033

東京都中央区新川 2-27-1

電話番号: 03-5540-2260

取扱説明書を必ずご参照ください。